

Műszaki információk

Kibocsátási vizsgálat	Megfelelőség	Elektromágneses környezet – útmutató
Rádiófrekvenciás kibocsátás CISPR II	1. csoport	A Philips Avent mellszívó rádiófrekvenciás energiát kizárólag saját, belső működéséhez használ. Ezért a rádiófrekvenciás kibocsátása igen alacsony. Így nem valószínű, hogy bármilyen interferenciát okozna a közelében lévő elektromos berendezésekkel.
Rádiófrekvenciás kibocsátás CISPR II	B osztály	
Hammonikus kibocsátások IEC 61000-3-2	A osztály	A Philips Avent mellszívó minden létesítményben használható, beleértve a lakókörnyezetet, valamint a lakossági célokat szolgáló épületeket ellátó, alacsony feszültségű, nyitvamos hálózatra közvetlenül csatlakozó környezeteket is.
Feszültség-ingadozások/feszültségregrések IEC 61000-3-3	Megfelel	

Nyitlakozat – elektromágneses zavartűrés

A Philips Avent mellszívót az alábbiakban meghatározott elektromágneses környezetben történő használatra tervezték. A Philips Avent mellszívó felhasználójának kell arról gondoskodni, hogy a mellszívót ilyen környezetben használják.

Zavartűrési vizsgálat	IEC 60601 mérőszint	Megfelelőségi szint	Elektromágneses környezet – útmutató
Elektrosztatikus kisülés (ESD) IEC 61000-4-2	= 6 kV érintkező: 8 kV levegő	= 6 kV érintkező: 8 kV levegő	A padlóburkolatok fának, betonnak vagy kerámialapnak kell lennie. Ha a padlóburkolat műanyag, akkor a relatív páratartalomnak legalább 30%-nak kell lennie.
Gyors elektromos transzients/lobás IEC 61000-4-4	= 2 kV hálózati áramellátó vezeték esetében	= 2 kV hálózati áramellátó vezeték esetében	A hálózati tápfeszültség a lakó vagy kórházi környezetre jellemző minőségű legyen.
Tűlfeszültség IEC 61000-4-5	= 1 kV differenciál módusú	= 1 kV differenciál módusú	A hálózati tápfeszültség a lakó vagy kórházi környezetre jellemző minőségű legyen.

PHILIPS
AVENT

SCF332/31 elektromos mellszívó

HASZNÁLATI UTASÍTÁS



Áttekintés



- 1 Motoregység szilikon csővel és hozzá tartozó szilikon dugóval
- 2 Szilikon membrán
- 3 Mellszívótest
- 4 Masszázs páma
- 5 Fedél
- 6 Elementartó ház (kizárólag szimptia típusú elektronikus mellszívó)
- 7 Be- és kikapcsológomb
- 8 Stimulálás gomb
- 9 Gyenge szívás gomb
- 10 Közepes szívás gomb
- 11 Erős szívás gomb
- 12 Adapter
- 13 Fehér szelep
- 14 Philips Avent Natural cumisüveg
- 15 Kupak
- 16 Leszorító gyűrű
- 17 Mellbimbó
- 18 Tejzáró

Előkészítés a használatra

Tisztítás és fertőtlenítés

A motoregységet, a szilikon csövet, a hozzá tartozó szilikon dugót és az adaptert nem szükséges tisztítani és fertőtleníteni, mivel azok nem kerülnek kapcsolatba az anyatejgel. A mellszívó valamennyi egyéb tartozékát tisztítsa meg és fertőtlenítsa az első használat előtt. Ezeket a tartozékokat minden használat után meg kell tisztítani és fertőtleníteni kell őket minden ezt követő használat előtt.

Tisztítható részek

Tisztítsa meg a következő részeket (az első használat előtt, illetve a későbbiekben minden használat után). Ellenőrizze az „Általános leírás” részben található listán, hogy a kiválasztott mellszívóhoz milyen tartozékok tartoznak.

Figyelmeztetés: A tisztításához ne használjon antibakteriális vagy dörzshatású tisztítószert.

- 1 Teljesen szerelje szét a mellszívót és a cumisüveget. Távolítsa el a fehér szelepet is a mellszívóból.
Figyelem! Legyen óvatos a fehér szelep eltávolításakor és tisztításakor. Ha a szelep megsérül, akkor a mellszívó nem fog megfelelően működni. A fehér szelep eltávolításához óvatosan húzza meg a szelep oldalán lévő bordázott fület.

- 2 Öblítse el az összes részt mosogatólábadában vagy mosogatógép segítségével.

Mosogató mosogatóban: Szedje szét a részeket és 5 percig áztassa őket enyhén mosogatószeres forró vízben. Valamennyi részt tisztítsa meg puha kefével vagy tiszta konyharuhával, majd teljesen (ábra 2) szárítsa meg őket.

Mosogató mosogatógéppben: A motoregység, a szilikon cső és a hozzá tartozó szilikon dugó, valamint az adapter kivételével, tisztítsa meg a részeket mosogatógéppben (csak a felső kosárban).

Megjegyzés: A szelepet úgy tudja megtisztítani, hogy enyhén mosogatószeres meleg vízben az ujjai között finoman megdörzsölgeti. Ne nyomjon bele semmit a szelepre, mert a szelep megsérülhet.

Fertőtlenítés (opcionális)

A tisztítást követően, ha fertőtleníteni kívánja a tartozékokat, akkor kifőzheti őket egy edényben.

A fertőtlenítéshez szükséges eszközök:

- Edény
- Jó minőségű ivóvíz

Fertőtlenítsa (főzze ki) a tartozékokat a következőképpen:

Töltsön egy edénybe annyi vizet, amennyi elfedi majd a tartozékokat. Forrassa fel a vizet. Helyezze a tartozékokat az edénybe és forrassa őket 5 percig (ábra 3). A forró víz fertőtleníti (kifőzi) során ellenőrizze, hogy a cumisüveg és a tartozékok ne érintkezzenek az edény oldalával. Ellenkező esetben a termék maradandóan deformálódhat vagy sérülhet, ezeket pedig a Philips nem vállal felelősséget. Várja meg, amíg a víz lehűl, majd óvatosan vegye ki a tartozékokat a vízből. Helyezze a tartozékokat egy tiszta papírtörőre vagy tiszta edényszárító állványra és hagyja őket teljesen megszáradni.

Figyelmeztetések

Figyelmeztetések a gyermek sérülésének elkerülése érdekében:

- A cumisüvegek és etetőcumik használata kizárólag felnőtt felügyeletében engedélyezett. Ne engedje, hogy gyermeke a termék kisebb tartozékaival játszon, illetve hogy az üveget vagy a poharat járás vagy futás közben használja.
- A fulladás elkerülése érdekében az etetőcumikat soha ne használja játszócumi helyett.
- Folyadékot hosszantartó és folyamatos cumizása tönkretelheti a fogakat.
- Etetés előtt mindig ellenőrizze az étel/anyatej hőmérsékletét, nehogy égési sérülést okozzon gyermekének.
- Amennyiben az anyag gyengülését vagy sérülését észleli bármelyik tartozékon, azonnal dobja el.
- A termék használaton kívüli részeit tartsa olyan helyen, ahol gyermek nem érheti el.
- Semmilyen módon ne alakítsa át a terméket vagy annak tartozékait. Az ilyen módosítás a termék nem biztonságos működését okozhatja.

Övintézkedések a termék károsodásának elkerülése érdekében:

- Ne tegye a sütőbe, a műanyag megolvadhat.
- A műanyag részek tulajdonságai fertőtlenítés során, és magas hőmérséklet hatására megváltozhatnak. Ez a kupak illeszkedését is befolyásolhatja.
- Ne hagyja az etetőcumit közvetlenül a napon vagy hőforrás közelében, valamint ne hagyja a javasoltnál hosszabb ideig fertőtlenítőszerben, mert ez károsíthatja a terméket.

Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
Fájdalmat érezek a mellszívő használatakor	Ne használja tovább a mellszívót és forduljon szakemberhez, illetve védőnőhöz. Ha a mellszívótestet nehezen távolítható el a melléről, előfordulhat, hogy a vákuum megszüntetéséhez az újat a mellé és a masszázspárna közé kell helyezni.
A mellszívő megjárt az időt	Rendszeres használat esetén az emyhébb karcolódás normálisnak tekinthető, és nem okoz problémát. Ha azonban a mellszívó valamelyik tartozéka erősen megkarcolódott vagy átroped, ne használja a mellszívót, és cserétartozék beszerzéséhez forduljon a Philips ügyfélszolgálatához vagy látogasson el a www.shop.philips.com/service weboldala. Ne felejtse, hogy a különböző tartozékok, fenttiltott oldatok, a légyfrott víz és a hőmérsékleti ingadozások együttes hatása miatt a műanyag bizonyos körülmények között megrepedhet. Ne használjon szűrőt, vagy antibakteriális tisztítószert, mivel ezek károsíthatják a műanyagot.
A mellszívő nem működik, és a be-/kikapcsoló gomb villog.	Először ellenőrizze, hogy megfelelően szerelte-e össze a mellszívót, és győződjön meg róla, hogy a cső nincs megfőve. Az interferencia megelőzése érdekében tartsa az egyéb elektronikus berendezéseket (pl. mobiltelefon, laptop) távol a mellszívótól a fejés ideje alatt. Amennyiben a szimptómás típusú elektronikus mellszívót elemekkel működött, az elemeket a használati útmutatóban lévő utasításoknak megfelelően cserélje. Ha az elektronikus mellszívót hálózatról működött, kizárólag a termékhez tartozó adaptert használja. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a magyarországi Philips ügyfélszolgálatához: www.philips.com/support .
Nem érezek szivőerőt.	Ellenőrizze, hogy megfelelően szerelte-e össze a mellszívót, az „Előkészítés a használatra” című részben leírt lépéseket követve. Ellenőrizze, hogy a szilikon cső megfelelően csatlakozik-e a motoregységhez, a szilikon dugóhoz és a membránhoz. Ellenőrizze, hogy a mellszívó úgy illeszkedik-e a melléhez, amely lehetővé teszi, hogy vákuum jöjjön létre. Ha továbbra sem érez szivőerőt, kérjük, forduljon a magyarországi Philips ügyfélszolgálatához: www.philips.com/support .
A mellszívó túl erősen szív.	Kövessen az alábbi utasításokat abban az esetben, ha úgy érzik, a mellszívó túlságosan erősen szív. <ul style="list-style-type: none">- Kizárólag a Philips Avert Comfort mellszívót tartozékokat használja.- Ellenőrizze, hogy a Comfort mellszívóra illesztette-e a masszázspárnát: ha nem használja a masszázspárnát, akkor lehetőséges, hogy túlságosan nagy a vákuum.- Amikor először használja a mellszívót, elképzelhető, hogy nagyon nagyok az érzések szivőerőt. Gyakorlással segíthet ezen a problémán. Ha a probléma ezt követően is fennáll, forduljon szakemberhez, illetve védőnőhöz.

Meghibásodott készülék esetén eredeti csomagolásban kérjük juttassa vissza cégünkhez a vásárlás dátumát igazoló irattal együtt.
Binszki Attila e.v. "BinOla" kereskedelmi és kölcsönző vállalkozás
Bácsalmás, Dózsa Gy. u. 53. Tel.: 79/341-442

Összeszerelés

- 1 Alaposan mosson kezet, mielőtt hozzányúl a megtisztított tartozékokhoz.

Figyelmeztetés: Legyen óvatos, mert a megtisztított tartozékok még forróak lehetnek. Csak akkor kezdje meg a mellszívó összeszerelését, ha a megtisztított tartozékok lehűltek.

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy úgy találja, a mellszívó nedves állapotban könnyebben összeszerelhető.

- 2 Helyezze be a fehér szelepet alulról a mellszívótestbe. Nyomja bele a szelepet amennyire csak lehetséges (ábra 7).
- 3 Az óramutató járásával megegyező irányban csavarja rá a mellszívótestet a cumisüvegre, amíg az biztonságosan (ábra 8) nem rögzül.
- 4 Helyezze a szilikon membránt felülre a mellszívótestbe. Ügyeljen arra, hogy szorosan illeszkedjen a peremre; ennek biztosításához az ujjával nyomja lefelé (ábra 9).
- 5 Helyezze a masszázspárnát a mellszívótest (ábra 10) harang alakú részébe.
- 6 Nyomja be a párna bebő részét amennyire csak lehetséges, és győződjön meg arról, hogy tökéletesen illeszkedik a mellszívótest (ábra 11) pereméhez.
- 7 Nyomkodja meg a számkok között az esetlegesen beszorult levegőt (ábra 12) eltávolításához.

Megjegyzés: Helyezze a fedetlet a párnára, hogy biztos maradjon a mellszívó, míg előkészíti a fejéshez.

Figyelmeztetés: Mindig párnával használja a mellszívót.

- 8 Csatlakoztassa az adaptert a fali aljzathoz, a másik végén lévő csatlakozódugót pedig a motoregységhez (ábra 13).
Az adapter hivatkozási kódja a készülék alján van feltüntetve. Csak a feltüntetett adaptert használja a készülékkel.
 - Ha elemről kívánja működtetni a készüléket (csak szimptómás típusú elektronikus mellszívó), forgassa el a motoregység alját az alján látható jelzések irányába (1. lépés (ábra 14)) és vegye le (2. lépés (ábra 14)). Helyezzen be négy új 1,5 V-os AA típusú elemet (vagy 1,2 V-os, ha újratölthető elemekről van szó) az elemházba. Ellenőrizze az elemházban található jelzéseket, hogy az elemeket pontatlanságuk megfelelően helyezze be. Illesse vissza a motoregység alját.

Megjegyzés: Új elemeket a működési idő 1-3 óra. A feltölthető elemek teljesítménye csökken az idő múlásával, így a működési idő rövidülhet.

Megjegyzés: Ha a motoregység elemházában benne vannak az elemek, de csatlakoztatja az adaptert a hálózathoz, a mellszívó a hálózati áramforrástól fog működni. Az elemek nem tolhatók újra a motoregységben.

Figyelmeztetés: Ne használjon egyszerre különböző típusú elemeket.

Figyelmeztetés: Ne használjon egyszerre régi és új elemeket.

- 9 Illesse a szilikon csövet és a hozzá tartozó szilikon dugót a membránra. Nyomja rá a szilikon dugót, amíg megfelelően nem rögzül (ábra 15).

Működtetés

- 1 Alaposan mosson kezet, és ellenőrizze a mellé tisztaságát.
 - 2 Helyezkedjen el egy kényelmes széken (a hátát támassza meg párnákkal). Készítsen maga mellé egy pohár folyadékot.
 - 3 Nyomja az összeszerelt mellszívótestet a melléhez. Ügyeljen arra, hogy a mellbimbója középen helyezkedjen el, hogy a masszázspárna légmentesen (ábra 16) zárhasson.
A dupla típusú elektronikus mellszívó felhasználói számára: A dupla típusú elektronikus mellszívó lehetővé teszi, hogy mindkét mellből egyszerre fejje az anyatejet. Ugyanakkor, a készüléket ugyanúgy használhatja egy mellből történő fejésre is. Illesse mindkét összeszerelt mellszívótestet a szilikon csőhöz és a hozzá tartozó szilikon dugóhoz. Tanácsos addig a fedetlet a másikra rakni.
 - 4 Ügyeljen arra, hogy a mellbimbója megfelelően illeszkedjen a párnába. Lásd: „A legmegfelelőbb párna kiválasztása” című fejezetet a helyes méretű párna megtalálásához.
 - 5 Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot (ábra 17).
 - A mellszívó automatikusan stimulációs üzemmódban indul el, és a be-/kikapcsoló gomb, illetve a stimulálás gomb villogni kezd.
 - Érezni kezdi a mellén a szivőerőt.
 - 6 Ha az anyatej folyása megindul, a leggyengébb szívás gomb (ábra 18) megnyomásával lassíthatja a ritmust.
 - 7 A saját kényelmétől függően használhat erősebb szívás módot is, mely erősebb szivőerőt biztosít. A megfelelő gomb megnyomásával bármikor visszatérhet egy gyengébb szívás módra (ábra 19). A mellszívót bármikor kikapcsolhatja, ha megnyomja a be-/kikapcsoló (ábra 20) gombot.
Megjegyzés: Nem szükséges minden szívás módot használnia; csak azokat használja, melyek kényelmesek.
- Figyelmeztetés: Mindig kapcsolja ki a mellszívót, ezáltal megszüntetve a vákuumot, mielőtt levonná a melléről a mellszívótestet.**
- Figyelmeztetés: Ha eredménytelen a fejés, akkor egyszerre 5 percnél tovább ne folytassa a műveletet. Próbálja meg a fejest a nap másik időszakában.**
- 8 Átlagosan 10 perc mellszívóhasználat szükséges 60-125 ml anyatej felszívásához az egyik mellből. Ez azonban csupán irányadó mennyiség. Néha en az minden nőnél eltérő lehet.
Megjegyzés: Ha alkalmazásként rendszeresen több mint 125 ml anyatejet fejt le, átlagosan 260 ml-es Philips Avert cumisüveget vásárolni és használni a túltöltés és a kiömlés elkerülése érdekében.
 - 9 Amikor befejezte a fejest, kapcsolja ki a mellszívót (ábra 20), és óvatosan vegye le a melléről a mellszívótestet.
 - 10 Csavarja le a cumisüveget a mellszívótestről. Több választási lehetősége van:
 - Helyezzen be egy feltöltött tejjárat egy feltöltött leiszorító gyűrűbe, majd csavarja rá a cumisüveget (ábra 21). A tejfej teje a cumisüvegben így készen áll a tárolásra.
 - Másik lehetőségként, helyezzen egy feltöltött etetőcumit és leiszorító gyűrűt a cumisüvegre az átmutató (lásd: „Etetés”) szerint. Zárja le az etetőcumit a kupakkal (ábra 22).
 - 11 Húzza ki a hálózati adaptert a fali aljzathoz, hogy a készülék ne csatlakozzon a hálózati áramforráshoz. Húzza ki az adaptert a motoregységből. Húzza ki a szilikon csövet és a hozzá tartozó szilikon dugót a szilikon membránból. Az egyszerű tárolás érdekében tekerje a szilikon csövet a motoregység köré, majd pattintsa rá a hozzá tartozó szilikon dugót a csőre (ábra 23).
 - 12 A mellszívó többi használt részét a „Tisztítás és fertőtlenítés” című fejezetben leírt utasítások szerint tisztítsa meg.