



Garancia

Teljes körű garancia vonatkozik a vásárlástól számított 12 hónapig a készülékre és 3 hónapig a tartozékokra.

Meghibásodott készülék esetén eredeti csomagolásban kérjük juttassa vissza cégünkhöz a vásárlás dátumát igazoló irattal együtt.

Binszki Attila e.v. "BinOla" kereskedelmi és kölcsönző vállalkozás
Bácsalmás, Dózsa Gy. u. 53. Tel.: 79/341-442



A garancia nem vonatkozik olyan károkra, amelyek a helytelen, szakszerűtlen kezelésre, rendeltetésellenes használatra ill. jogosulatlan személyek általi használatra vezethetők vissza. Az ilyen jellegű károk javítása csak térítés ellenében lehetséges.



Specifikációk

Súly: 1,5 kg

Biztosíték: 3.15 AL 250 VP

- II. érintésvédelmi osztály  B típus  A megsemmisített készüléket az arra alkalmas hulladékgyűjtőbe helyezze!

Feszültség	Frekvencia	Névleges áram	Megjegyzés
100V~	50/60Hz	0.9/0.65A	
110V~	50/60Hz	0.5/0.40A	
120V~	60Hz	0.63A	
220V~	50/60Hz	0.42/0.33A	
230V~	50/60Hz	0.25/0.20A	
240V~	50/60Hz	0.24/0.18A	



UNI MOM FORTE

ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ

HASZNÁLATI UTASÍTÁS



Gondoskodj a babádról Unimom-mal!

- kórházi erősség
- kétoldalú szívás
- ritmikus szívás (utánozza a baba szívását)
- kényelmes
- BPA mentes műanyag flakon
- extra hosszú motor élettartam



Figyelmeztetések

Használat előtt alaposan olvassa végig:

Az elektromos eszköz használata alatt az általános biztonsági óvintézkedéseket kell betartani.

⚠ VESZÉLY: az áramütés elkerülésének érdekében

1. Használat után mindig húzza ki az elektromos készüléket!
2. Ne használja fürdés közben!
3. Ha a készülék vízbe esett, ne érintse meg azonnal, előbb áramtalanítsa!

⚠ FIGYELMEZTETÉS: égés, áramütés, tűz vagy személyi sérülés elkerülésének érdekében

1. Ha a készülék áram alatt van, ne hagyja felügyelet nélkül!
2. Csecsemő vagy gyermek mellett való használat alatt mérsékelt figyelem szükséges
3. Csak az Unimom készülékhez járó adapterrel használandó
4. Csak az Unimom tartozékokkal ajánlott használni
5. A készüléket az útmutatóban leírtaknak megfelelően szabad használni
6. Soha ne üzemeltesse a készüléket, ha a csatlakozó vagy a kábel sérült, ha nem működik megfelelően, ha leesett, megsérült, vízbe esett vagy bármely tartozéka törött vagy hiányzik

Fejési útmutató

1. helyezze kényelembe magát
2. gyengéden masszírozza a mellét vagy alkalmazzon meleg borogatást a mellbimbó felett, mielőtt használná a készüléket
3. egy-egy mellből kb 10-15 percig fejjen. Sokkal hatásosabb, ha gyakran fejjük az anyatejet, mintha sokáig tennénk.
(célszerű: 2-3 óránként, 8x/nap)

Megjegyzés: a baba szoptatása és az anyatej egyidejű fejeése nem zárja ki egymást


⚠ Amennyiben szívproblémái vannak, konzultáljon orvosával a készülék használata előtt!

Rendeltetészerű használat

1. könnyít a vérbőségen
2. anyatej-fejés távol a babától

Áttekintés

1. fogó
2. vákuum erősség szabályozó
3. csatlakozó
4. biztosítéktartó
5. tápkábel
6. kapcsoló

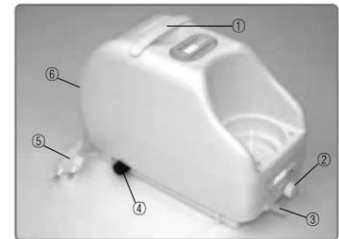

Hogyan használjuk

1. állítsuk össze a készüléket
2. gyenge vákuummal kezdjük
3. mellbimóját illessze a mellszívó tölcser középebe
4. kapcsolja be a készüléket
5. állítsa be a megfelelő vákuum erősséget a szabályzóval
6. használat után kapcsolja ki a készüléket

Megjegyzés: tisztítsa meg a kezeit és fertőtlenítse a felszerelést forrásban lévő vízben (2-3 percig, kivéve a szilikon csövet) mielőtt használja a mellszívót

- ⚠** Ne csavarja be a csövet!
⚠ Ne töltsen túl az üveget 4 OZ szinten túl!

Tisztítás és sterilizálás

1. Távolítsa el a szelep fejét és a membránt a szívópajzsról
2. Tisztítsa és sterilizálja az eszközt forrásban lévő vízben 2-3 percig
3. Vegye le a légszövet és óvatosan tisztítsa át mosószerrel
4. Legalább egy héten egyszer végezze el a tisztítást, de amennyiben használta a készüléket, utána azonnal tisztítsa meg azt.

Megjegyzés: a páralecsapódás kiküszöbölése ill. a tej légszöbe kerülésének elkerülése érdekében a tisztítás után hagyjuk száradni a készüléket. A készülék fő részét nedves törölkendővel tisztítsuk meg.

Figyelem: Soha ne tegyük vízbe a készülék egészét. A készüléket ne tegyük mikrohullámú sütőbe.

Tartozékok




- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| A. szívópajzs 2 db | B. műanyag tejtartó flakon 2 db |
| C. üveg borítás 2 db | D. hálózati csatlakozó 1 db |
| E. fő test 1 db | F. flakontartó talp 2 db |
| G. légszűrő 2 db | H. sapka 2 db |
| I. lemez 2 db | J. cumi 2 db |
| K. mellszívó csomk 2 db | L. membrán 2 db |
| M. kettős elágazó | |

Felszerelés: A+B+C+...+L

Üzembe helyezés

1. egyoldalú szívás

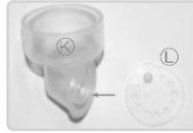

1. Illessze a membránt (L) a szívó csomkhoz (K)



2. A szívó csomkót nyomja a szívópajzs (A) tetejéhez




3. Az üveget (B) csavarja a szívópajzshoz



4. Az üveget helyezze el az üvegtartóba (F)



5. Csatlakoztassa a légszűrő egyik végét (G) a szívópajzshoz

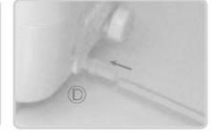

6. A másik végét csatlakoztassa az egység csatlakozóhoz (D)

2. kétoldalú szívás

Az 5. pontig megegyezik az egyoldalú szívás üzembe helyezésével



6. Csatlakoztassa a dupla csatlakoztatót (M) az egység csatlakozóhoz (D)



7. A légszűrő másik végét csatlakoztassa a dupla csatlakozóhoz

Az anyatej tárolásának módja

A legjobb az, amikor közvetlenül a fejés után tudjuk etetni a babát, azonban ha ez nem kivitelezhető, fordítsunk megfelelő figyelmet az anyatej tárolására.

Megjegyzés: Fagyasztás előtt 2 órán át hűtsük hűtőben az anyatejet

FIGYELMEZTETÉS: a fagyasztott anyatejet címkézzük fel és lássuk el dátummal! Ne keverjük a friss anyatejet fagyasztott anyatejgel!

Az anyatej olvasztása

1. Használat előtt több órával vegyük ki a mélyhűtőből az anyatejet.
2. Etetés előtt tegyük meleg folyóvíz alá az üveget, amíg a tej szobahőmérsékletű nem lesz.
3. Rázzuk fel jól az üveget.

FIGYELMEZTETÉS: ne olvassuk a tejet mikrohullámú sütőben, mert az károsan befolyásolja az anyatej összetevőit. Az anyatejet nem szabad visszafagyasztani!

A készülék tárolása

Minden használat után tisztítsuk meg és töröljük át egy nedves kendővel, a fő készüléket és annak alkatrészeit.

FIGYELEM: ha a készüléket huzamosabb ideig nem használjuk, tároljuk hűvös helyen.

Hibajelzések

Hibák	Lehetséges okok	Ellenőrizzük...	Megoldás
Nincs szívás	Biztosíték	Ellenőrizzük, hogy a biztosíték csatlakoztatva lett-e	Cserélje ki a megfelelő biztosítékot és kövesse az specifikációt
	Kapcsoló	Ellenőrizzük, hogy a készülék be van-e kapcsolva	Ha a termék nem működik, miközben bekapcsolts állapotban van, kérjük vegye fel a kapcsolatot a céggel
	Tápkábel	Ellenőrizzük, hogy megfelelően van-e csatlakoztatva	Dugjuk be a konnektorba
Alacsony szívás	Légszűrő	Ellenőrizzük, hogy a légszűrő megfelelően van-e csatlakoztatva a készülékhez	Nézzé meg, hogyan kell csatlakoztatni és csatlakoztassa légszövet a megfelelő módon
	Mellszívó pajzs/membrán	Ellenőrizzük, hogy megfelelően csatlakozik-e a pajzsral	Szerelje szét majd rakja össze újra az alkatrészeket
	Hiányos összeszerelés	Ellenőrizzük a készüléket	Szedjük szét majd rakjuk össze újra
Fájdalom	Mellszívó pajzs	Ellenőrizzük, hogy probléma van-e a pajzsral	Vásároljon egy új pajzsot
	Membrán	Ellenőrizzük, hogy van-e hely a szelep és a membrán között	Távolítsuk el az idegen anyagot
	Túl erős szívás	Ellenőrizzük a beállított szívás erősséget	Állítsuk a legkisebb szívási erősségre Konzultáljon a védőnővel vagy orvosával

FIGYELEM: amennyiben a készülék abnormális zajt produkál vagy ha az anyatej kifolyik a fő tartóból, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a céggel. Amennyiben az anyatej csak a légszűrőig folyik túl, vegye azt le a készülékről és tisztítsa ki.